

Assembler l'ensemble d'expression
(instructions à l'endos de cette feuille)



Insérer le connecteur double dans
le piston (sur le côté du tire-lait)



Placer le mamelon au centre de
la coupole pour créer un sceau
étanche



Mettez en marche le tire-lait en
tournant le bouton «vacuum»
vers la droite



Tourner le bouton «cycles»
complètement vers la droite pour
débuter la phase de stimulation



Quand votre lait commence à
s'écouler tournez le bouton
«cycles» vers la gauche pour
débuter la phase d'expression



Ajustez la force de succion à l'aide
du bouton «vacuum» pour atteindre
votre niveau de confort optimal



Pour arrêter l'appareil tourner le
bouton «vacuum» complètement à
gauche


Pour optimiser votre séance d'expression

Un tire-lait bien ajusté peut faire une différence sur votre confort et la stimulation des seins.

L'utilisation du tire-lait ELITE combiné à un massage des seins et à l'expression manuelle augmente l'efficacité de la séance.

Pour du soutien en lien avec l'allaitement, l'utilisation et l'ajustement du tire-lait contactez-nous 581-560-9956

Votre marraine d'allaitement peut aussi vous aider.

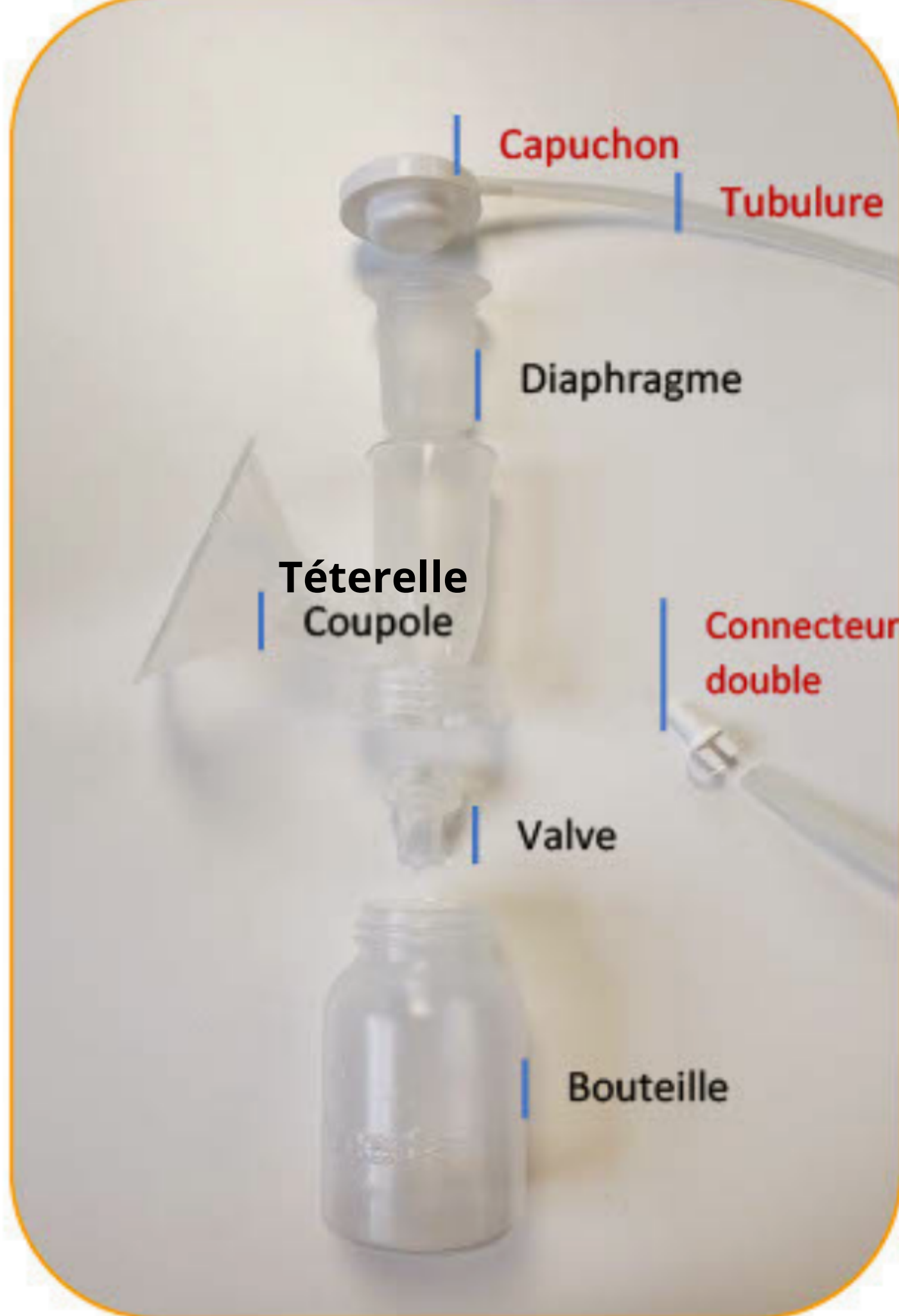

Nettoyage de l'ensemble d'expression.

1. Démontez l'ensemble
2. Retirez les parties en **rouge** (connecteur double, tubulure et capuchon). Ces dernières **ne doivent pas** être submergées dans l'eau ni stérilisées.
3. Rincez à l'eau froide le diaphragme, la coupole, la valve et la bouteille. Puis nettoyez à l'eau chaude et savonneuse. Utilisez une petite brosse au besoin.
4. Rincez à l'eau claire et laissez sécher à l'air sur une serviette propre ou un support de séchage.
5. Stériliser une fois par jour.



Nettoyage du tire-lait

1. Retirez le cylindre à piston en le soulevant vers le haut
2. Nettoyez en surface avec un linge trempé dans l'eau tiède et savonneuse
3. Remettez le cylindre à piston dans les barres d'attache et pressez délicatement en place

Cet appareil appartient à TrioLait 581-560-9956