

# INFO TIRE-LAIT

*Bulletin d'information électronique rédigé par TrioLait*



## IDENTIFIER LES BESOINS

*Il est primordial de déterminer les besoins de la famille avant de faire l'achat d'un tire-lait, qui sera acheté de préférence en postnatal.*

*Aucun accessoire n'est indispensable lorsqu'on parle d'allaitement.*

### Pour un usage:

- **Occasionnel** : faire une petite réserve, soulager l'engorgement = Tire-lait électrique simple ou manuel.
- **Fréquent** : remplacer une tétée pour retour au travail ou à l'école, plusieurs fois par jour = Tire-lait électrique double.
- **Intensif** : tire-allaitement, hospitalisation de la mère ou du bébé, augmenter la production = Tire-lait électrique double de grade hospitalier.



## CARACTÉRISTIQUES D'UN BON TIRE-LAIT


*Un moteur efficace contenant un mode stimulation et un mode expression ainsi que plusieurs forces de succion afin de maximiser le confort lors de l'expression et le drainage des seins.*

## CARACTÉRISTIQUES D'UN BON TIRE-LAIT

*Pièces de rechange et différentes grandeurs de coupoles (téterelles) facilement disponibles au Canada.*

*Service après-vente et garantie.*

*Contactez-nous! Chez Triolait, nous nous assurons d'avoir les pièces de rechange disponible pour tous nos tire-lait et nous pourrions vous aider à faire votre choix parmi l'ensemble des modèles offerts sur le marché.*

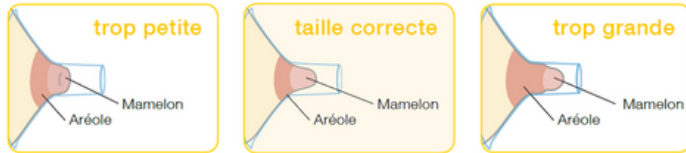

Le mamelon = frotte - sur le côté de l'embout.  
Essayez une téterelle plus grande.

Le mamelon est centré et bouge librement.

Le mamelon et le surplus de tissu aréolaire sont tirés dans l'embout.  
Essayez une téterelle plus petite.

## AUTRES ACCESSOIRES

*Récolteurs de lait à pression négative (Haakaa et Naturebond) :*

- *Attention au risque de diminution de transfert de lait de maman vers bébé et au risque de blessure.*



## SE SOUVENIR DE LA BASE

*L'expression manuelle demeure une méthode facile, accessible et la plupart du temps, très efficace pour l'expression de lait.*

*L'expression manuelle devrait être la méthode privilégiée pour l'expression du lait en pré-natal et en post-natal immédiat!*



Photo tirée du site web de Medela

## LE SAVIEZ-VOUS?



*Il n'est pas recommandé de faire l'achat d'un tire-lait usagé en raison des risques de contamination d'un lait maternel à l'autre. Seuls les tire-lait de location identifiés comme tels par les fabricants (tire-lait multi-utilisatrice) sont sécuritaires, à condition de changer l'ensemble des pièces qui sont en contact avec le lait maternel (ensemble de tubulures).*

*Voici un article intéressant:*

*Puis-je utiliser un tire-lait usagé s'il a été stérilisé?*

*Chez TrioLait, nous offrons la location de tire-lait Ameda Élite multi-utilisatrice afin d'aider les familles ayant des difficultés d'allaitement. Nous vendons également des tire-lait, des pièces de rechange (coupoles, valves, etc.) ainsi que des coussins d'allaitement de la marque Neka.*

*Appelez-nous afin de venir voir nos produits!*



Photo tirée du site web de Neka Canada

*Laissez-nous un message sur la boîte vocale de TrioLait au **418-541-7095** pour demander un jumelage avec une marraine d'allaitement bénévole.*

*Pour toutes questions ou besoin de support en allaitement vous pouvez joindre l'équipe de TrioLait au **581-560-9956**.*

*Pour des informations générales, vous pouvez aussi consulter notre [page Facebook](#).*